

5

フィエラ<sup>®</sup> がうまく密着すると、LEDライトがピンクの点灯に代わり、振動はパルスから一定の刺激に変化します。

そうなった時点で、ボタンを使うことができるようになり、あなたの好みに合わせた強度と刺激パターンを選べます。(もしリモコンを持っていれば、「フィエラリモコン」のパネルを見てください)



フィエラ<sup>®</sup> はハンズフリー製品です。設定やポジションを変更する際、フィエラ<sup>®</sup> を固定しておくことをおすすめします。フィエラ<sup>®</sup> を、5～15分、あるいはあなたがムードに達するまで所定の場所にホールドしておいてください。最大20分までフィエラ<sup>®</sup> を使用することで、最大限の感覚を存される方もいます。

6

準備ができたらフィエラ<sup>®</sup> を離しましょう。フィエラ<sup>®</sup> は自動的にオフになります。

## 〈 フィエラ<sup>®</sup> の適切なケアの方法 〉

7

ソフセンス (So(Sense) リングを取り外して、洗剤と水で優しく洗ってください。

8

フィエラ<sup>®</sup> のすべての面を、洗剤と水を使って優しく洗います。もし必要であれば、めん棒を使ってステイミュレーター (刺激装置) のまわりをきれいにして下さい。決して水に洗めないようにしてください。

9

再使用もしくは充電する前にしっかりと乾かしてください。

10

フィエラ<sup>®</sup> を充電して、次の使用に備えましょう。

さらなる詳細な取扱説明については、フィエラ<sup>®</sup> ユーザーガイドをご覧ください。

fiera<sup>®</sup>

### クイックスタートガイド


初めてのお客様は以下のサイトから使い方を動画をご覧ください。



<https://www.fiera.jp/support>

## フィエラ® リモコン

- ① リモコンに単4電池を2本入れてください。
- ② リモコンのいずれかのボタンを押して、スリープモードから回復させます。
- ③ フィエラ® の電源ボタンを押してください。すると、リモコンのLEDライトがフィエラ® のLEDライトと一致ようになります。
- ④ フィエラ® とリモコンのLEDが緑の点灯であることを確認してください。
- ⑤ 貴方の身体にフィエラ® をあてがいきましょう。
- ⑥ リモコンを使って、フィエラ® の強度とパターンオプションを楽しみましょう!

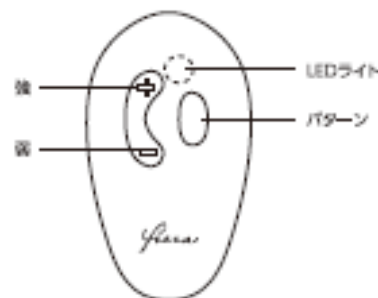

### リモコン電池の入れ方

- ① リモコンを写真のように裏返し、裏フタをスライドさせて開けてください。
- ② リモコンに単4電池を2本入れます。
- ③ 写真のように右側の手前が +、左側の手前が - になるように入れてください。

## 1


フィエラ® を充電してください



緑の点灯=充電完了  
赤の点灯=充電が必要  
赤の点滅=過熱(オーバーヒート)

## 2


ソフセンスリングを装着します

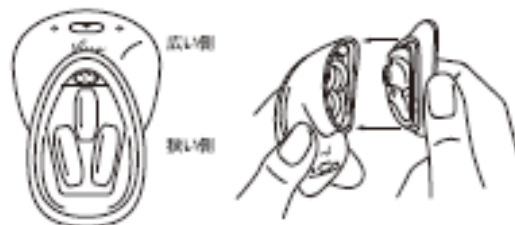

しっかり装着されると、ピンホールがきれいに見えます。

## 3

電源ボタンを押し、フィエラ® を起動しましょう。  
緑のLEDライトが付いていれば充電が完了しているというサインです。

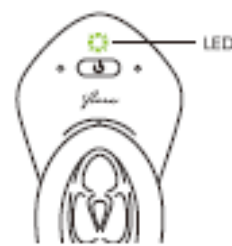

フィエラ® は身体にうまく密着しないと操作できません。

フィエラ® をよりうまく密着させるためには、水や水ベースの潤滑剤をソフセンスリングに少し滴下してください。

## 4

外陰唇を開きます。フィエラ® をクリトリスの上に置き、密着させるように押し込みます。

フィエラ® をあなたの身体にくっつけて密着させていくと、フィエラ® のパルス(定期的な振動)が感じられ、LEDライトはピンクの点滅になります。

正確な位置に固定できるまで、数回試す必要があるかもしれませんが、しっかり装着されると、大陰唇がソフセンスリングを覆うようになります。

